

BIOPTRON[®] 

■BIOPTRON PR01 (バイオプトロンプロ1)

卓上タイプの中型タイプ。フレキシブルな動きでストレスを感じずに光を浴びていただけます。



重 量：3.4kg
外形寸法：幅 255mm
奥行 385mm
高さ 410-720mm
消費電力：75W
フィルター直径：10cm

BIOPTRON PR01 (専用スタンド)



重 量：3kg
外形寸法：幅 580mm
奥行 700mm
高さ 730~1030mm

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■BIOPTRON YOUTHRON (バイオプトロンユースロン)

コンパクトサイズにタイマー機能がついて新登場!! 人間工学に基づいたハンドグリップで手軽に自宅でケアができます。



重 量：0.5kg
外形寸法：幅65mm
奥行180mm
高さ200mm
消費電力：29W
フィルター直径：5cm

BIOPTRON YOUTHRON
(専用スタンド)



重 量：2kg
外形寸法：幅490mm
奥行550mm
高さ695-1040mm

BIOPTRON YOUTHRON
(専用卓上スタンド)



重 量：0.3kg
外形寸法：幅160mm
奥行140mm
高さ225-250mm

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■BIOPTRON (カラーレンズ)

自然には、身体を健康な状態に維持する独自の方法があり、とりわけ色と光によるセラピーは、人類が最初に用いた、テクノロジーだと考えられています。バイオプトロンのカラーライトシステムとは、わたしたちの心身の活力向上のために7つのカラー (赤・橙・黄・緑・青・藍・紫) と光を利用する方法です。「心」「身体」「精神」に作用し、トータルバランスを整えます。

■BIOPTRON PR01
(カラーレンズセット)



■BIOPTRON YOUTHRON
(カラーレンズセット)



*BIOPTRON本体は別売りです。

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■高濃度酸素ミストスワッツ

スイスの山地から湧き出る天然水に無菌状態で酸素を高压注入。お肌に酸素を加えると、衰えた細胞にエネルギーを与え、お肌が本来持つ自ら潤う力、再生する力を引き出します。無香料・無着色・無添加で、肌質を選ばず、小さなお子様にお使いいただけます。



容 量：300ml

バイオプトロンと一緒にご利用いただくと更に効果が期待され、店頭品にもおすすめです。

BIOPTRON[®] 



自然の光をサロンで再現
スイス生まれの美と健康の光
バイオプトロン

Face

Body

Hair

BIOPTRON

AGLEX
share good life

発売元

AGLEX
share good life

【本社】

〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンB棟9階
TEL.043-350-0111 FAX.043-350-0114



www.agrex.co.jp

世界中で愛されているロングセラーの美容機器バイオプトロン




まずはバイオプトロンの良さをこちらのワードで検索してみてください。

バイオプトロン 口コミ



BIOPTRON とは

自然の太陽光線には紫外線・赤外線・可視光線などの波長がありますが、その中の可視光線は紫外線と違い、日焼けの心配もなく、安全な光とされていて、健やかなお肌・身体へと導く、自然治癒力を高める効果が期待されています。また、赤外線は身体を深部から温め、全身の巡りと働きをUPさせます。バイオプトロンは可視光線と一部の赤外線を同時に照射できる美容機器。1回10分の照射で肌の健やかさを保ち、心地よい温かさで気分もリフレッシュ。心も身体もリラックスさせます。エイジングケアはもちろん、疲労回復、代謝UPなどボディからヘアまでサロンに合ったメニューに導入することができます。

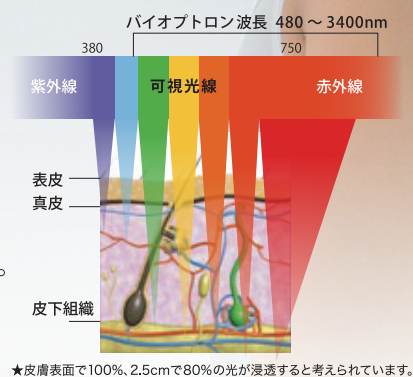

HOW TO USE

1

トリートメント部位の汚れやメイク・脂分を取り除きます。

2

トリートメント部位に水分と酸素を補給するため、※スウォッツをスプレーします。

3

タイマーを設定します。目安は1カ所4～10分です。

4

START ボタンを押し照射します。途中で何度か、スウォッツをスプレーします。


5

ライトを肌から、約10cm離し部位に対して90度の角度で照射します。

※店販品でもおすすめ！スイスの大自然から生まれた、高濃度酸素ミスト「スウォッツ」については裏表紙をご覧ください。


- 特性 1 - 偏光性

バイオプトロンに内蔵されている5枚の特殊フィルターにより、ポラライズ（偏光化）され光線を直線化し平行線状に集光させます。ポラライズされる事で効率良く有効性の高い光に整えます。

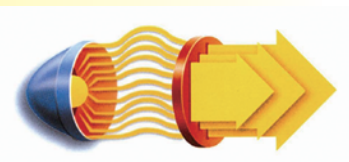

- 特性 2 - 多色光

バイオプトロンの光は、可視光線と一部の赤外線を含む広い波長範囲です。紫外線は100%カットされており、日焼けの心配はもちろんありません。

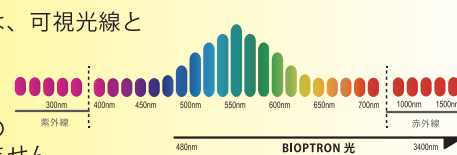



- 特性 3 - 低エネルギー

バイオプトロンの光エネルギーは、安心・安全に、身体や肌を活発させる最適密度（1分間当たり MAX2.4J/cm²）に設定されています。



- 特性 4 - 非干渉性

バイオプトロンの光は、レーザーのような一貫性のある刺激的な光とは違い、位相の違う一貫性のないゆるやかな光の為、肌にダメージを与えることなく、安全にトリートメントが行えます。

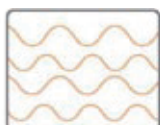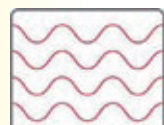

レーザー光

Biopton 光



足裏から全身の代謝 UP!...



手のお手入れにも ...



頭皮のケアに ...



お顔はもちろん、身体のあらゆる部位にも ...